

Surlunettes



Les surlunettes sont conçues pour être portées par-dessus vos lunettes. Elles constituent l'option la plus abordable et elles peuvent être utilisées par-dessus toute paire de lunettes, alors il n'est pas nécessaire de les modifier lorsque votre ordonnance change. Le port et l'apparence constituent des préoccupations pour certains.

Clips magnétiques



Les montures à clips magnétiques de Chadwick Optical offrent différentes options de design, ainsi que le meilleur port et la meilleure apparence. Pour offrir la meilleure apparence, une lentille teintée est ajustée sur la monture pour masquer les prismes. Certains patients ayant une dextérité limitée peuvent avoir de la difficulté à fixer les clips; ainsi, demandez une démonstration à votre médecin pour savoir si les clips magnétiques vous conviennent.

Monture avec ordonnance monovision de loin



Le meilleur équilibre entre port, apparence et investissement, une monture normalisée avec une ordonnance monovision fait le travail.

Consultez le site Web chadwickoptical.com ou votre médecin pour obtenir la liste actuelle des surlunettes et des montures disponibles.

Les prismes périphériques ont une efficacité maximale lorsque vous marchez ou conduisez. Mais en réalité, la plupart du temps, est-ce que vous marchez ou conduisez? Mais quand vous le faites, vous avez besoin d'une solution rapide pour accroître la conscience de votre champ aveugle.

Avec ceci à l'esprit, nous offrons de nombreuses combinaisons d'options qui correspondent à votre style de vie et à votre budget. **Consultez le site Web chadwickoptical.com ou votre médecin pour obtenir la liste actuelle des surlunettes et des montures disponibles.**

	Port	Facilité d'utilisation	Apparence	Investissement
	Est-ce que ça entre dans votre poche de chemise?	Pour les patients avec dextérité limitée	C'est joli?	Combien ça coûte?
Surlunettes	☹	😊	☹	😊
Clips magnétiques avec prisme dans la monture	😊	☹	😊	☹
Clips magnétiques avec prisme dans les clips	😊	☹	😊	☹
Ordonnance monovision de loin	😊	😊	😊	😊

*Le Peli Lens™ ne doit être ajusté que par ou sous la direction d'un médecin ou d'un autre professionnel ophtalmologique qualifié

La lentille Peli Lens^{MC} est une marque de commerce de Chadwick Optical Inc.




Entreprise familiale en activité depuis 1981

www.chadwickoptical.com

PL PB FR - 9/27/18




Déplacez-vous en toute confiance

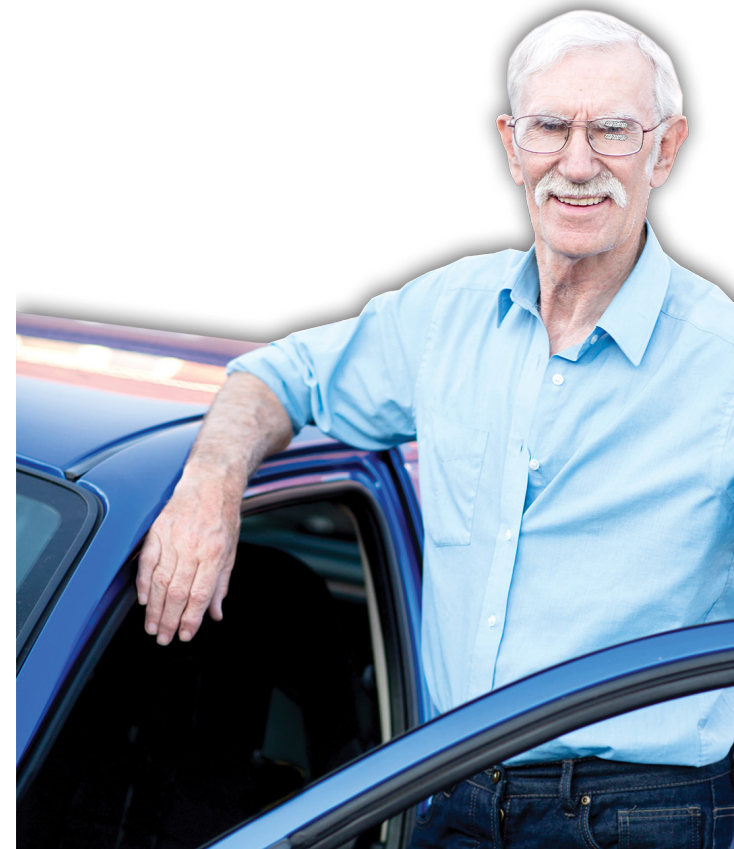

Tirez le maximum de vos prismes périphériques

Il est très important que vous regardiez **entre** les prismes pour obtenir les avantages du champ visuel étendu. Le fait de regarder directement **à travers** le prisme entraînera une vision double. Ce n'est pas souhaitable.

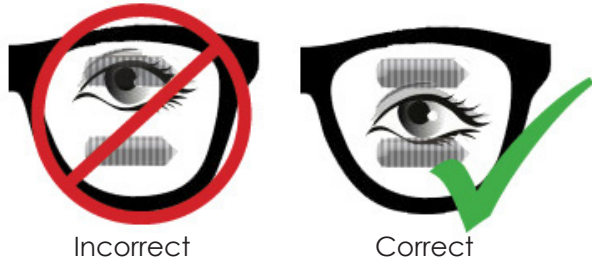

La première fois qu'ils sont portés, les prismes périphériques entraînent un certain niveau de confusion visuelle. Vous essayez de distinguer quelle information se trouve dans votre champ aveugle et quelle information se trouve dans votre champ voyant. Le but de la formation est de minimiser cette confusion.

Nettoyage

Important: N'enlevez pas les prismes des lentilles de lunettes pour le nettoyage. Pour bien entretenir vos prismes temporaires, utilisez souvent la procédure ci-dessous. Si les prismes se décolorent ou se détachent, consultez votre professionnel des soins de la vue pour un remplacement.

1. Rincez les lentilles des lunettes sous un filet d'eau chaude courante. S'il reste des contaminants après le rinçage, utilisez une brosse pour nettoyer les rainures.



2. Asséchez ou épongez avec un linge doux sans peluche.



3. Suivez toutes les procédures de nettoyage particulières selon les indications de votre spécialiste des soins de la vue.



Formation atteindre et toucher

Il faut faire ces exercices fréquemment pendant la période d'essai des prismes temporaires. Votre objectif avant le rendez vous de suivi devrait être de **six heures** de formation, ou environ 20 minutes par jour.

Avec un compagnon : Pendant que vous fixez le nez de votre compagnon, il déplace sa main dans votre champ aveugle. Vous pointez et touchez sa main lorsque vous la détectez à travers le prisme.

Méthode à faire soi-même : Vous pouvez faire cette formation vous-même en atteignant et en touchant les objets lorsque vous les détectez à travers les prismes.




Formation en marchant

Marchez dans des zones sans obstacle comme un corridor, puis passez progressivement à des zones encombrées, comme un salon avec des meubles qui peuvent représenter des obstacles potentiels. Notez vos observations. Lorsque vous faites cet exercice à la maison ou dans des lieux publics, il est recommandé d'avoir une personne pour vous aider.



Les prismes permanents offrent **76% plus d'expansion de champ** que les prismes temporaires!

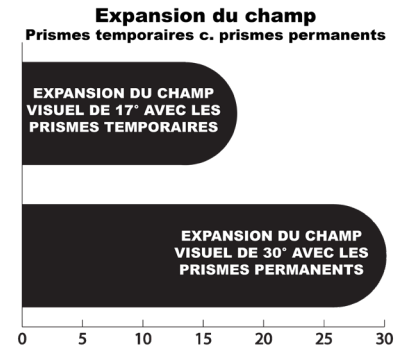


Option oblique pour la conduite

Si vous conduisez ou planifiez de conduire, assurez-vous de choisir **l'option oblique**. La configuration du prisme oblique vous donne une plus grande conscience de votre ligne médiane. La capacité de conduire dépend des lois de votre État, de votre province ou de votre pays.

Détection accrue des collisions

Les prismes permanents offrent plus du double de détections des collisions potentielles que les prismes temporaires. Marchez avec confiance dans une épicerie ou un centre commercial.

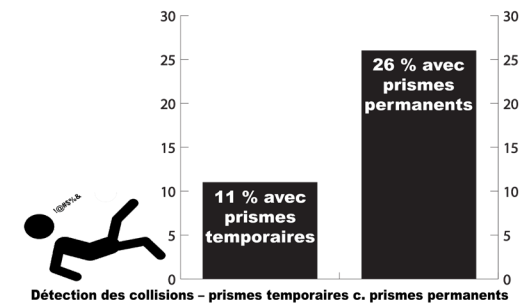

Qualité

Les prismes permanents sont faits d'acrylique PMMA de première qualité, ce qui offre un meilleur contraste et plus de champ visuel. Et ils sont collés sur la lentille à l'aide d'un adhésif à durcissement UV résilient. Ils ne se décolleront pas et ne tomberont pas, tout simplement.